

L-Mesitran Soft antibacteriële wondgel (honing)



Indicatie/applicatie

Deze antibacteriële wondgel wordt gebruikt voor de behandeling van chronische wonden, oncologische wonden en acute wonden (o.a. schaaf-, en snijwonden, ontvellingen en 1e en 2e graads brandwonden).

De wondgel is de milde vorm van L-Mesitran wondzalf voor het creëren van een vochtig wondmilieu (droge wonden) en ook voor het opvullen van de diepere wond.

De hydro-actieve wondgel is tevens schimmeldodend.

Voor oppervlakkige en diepe wonden.

L-Mesitran Soft is uitstekend preventief antibacterieel toepasbaar en zorgt voor een snelle weefselregeneratie.

L-Mesitran Soft kan in een 'wondopvullende' hoeveelheid worden aangebracht en afgedekt met een wondverband of wondpleister. Er zijn geen contra-indicaties en bijwerkingen bekend.

Productinformatie

- bestaat uit gesteriliseerde zuivere honing, glycolgelbasis, Medilan (non-allergeen), vitamine C en E (anti-oxidanten)
- antibacterieel (bacteriocide)
- schimmeldodend (fungicide)
- necrose en fibrineus beslag oplossend
- geurneutraliserend
- ontstekingsremmend
- creëert een vochtig wondmilieu
- optimaliseert de wondgenezing
- voorkomt verkleving van het wondverband
- verbandwisseling 1 à 2 dagen

➤ Verschillen wondgel met wondzalf

- de wondgel is gemakkelijker smeerbaar, terwijl de wondzalf een compacte samenstelling heeft
- de wondgel kan in grote hoeveelheden worden aangebracht, terwijl de wondzalf dun dient te worden aangebracht
- de wondgel is geschikt voor het opvullen van diepere wonden
- de wondgel veroorzaakt geen prikkeling in de wond, terwijl de wondzalf dat in enkele gevallen wel kan geven

Aantal praktische (honing) gebruikstips:

- Bij acute wonden (schaaf-, snijwonden, ontvellingen) moet de wond altijd worden schoongespoeld en zand en vuil worden verwijderd. Er is een misverstand dat een ontsmettingsmiddel / antibacterieel middel daarvoor de oplossing is. Na deze reiniging het antibacteriële middel pas toepassen.
- Geïmpregneerde zalfgazen worden veel gebruikt, maar kleven aan de wond door uitdroging van o.a. wondvocht. Door de Mesitran zalf of gel daaronder aan te brengen krijg je een actieve wondbehandeling, werkt het preventief tegen infectie en hecht het niet meer aan de wond.
- Elke wond verdient een snelle ongecompliceerde genezing, in een vochtig wondmilieu, goede bacteriële bescherming en een dun comfortabel verband.